

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP-MT-CGO 008 - LARINGOSCOPIO**

1. Objetivo:

- Manutenção corretiva dos equipamentos.

2. Campo de Aplicação:

- Ambulatorial

3. Responsabilidade:

- Colaboradores da Manutenção.

4. Descrição:

Quando: Sempre que solicitado manutenção corretiva.

Como:

- Abrir OS;
- Retirar o aparelho e encaminhar para manutenção;
- Testar o cabo com multímetro pra verificar se a tensão de saída é de 3V;
- Se o problema estiver no cabo desmontá-lo e detectar o problema (geralmente é na ponta do cabo), realizar a limpeza das terminações, montar e testar;
- Verificar a lâmina;
- Retirar a lâmpada e testá-la com o cabo;
- Se estiver queimada solicitar a compra de outra junto ao setor administrativo e substituí-la.
- Testar a lâmina do ponto de conexão do cabo com a lâmpada com o auxílio do multímetro, se estiver rompido solicitar a substituição da mesma, senão realizar a limpeza;
- Montar;
- Testar;
- Devolver ao setor de origem;
- Fechar a OS.

	Nome	Data
Elaborado por:	Adriano Vieira da Silva	02/05/2024
Aprovado por:	Marcelo Lopes Fagundes	02/05/2024